

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto instrukce.

**PRO POUŽITÍ POUZE U JEDNÉ OSOBY** – stejná osoba může pomůcku používat opakovaně.

**PRO POUŽITÍ POUZE V JEDNOM TĚLNÍM OTVORU** – nepoužívat zároveň análně i vaginálně.

Dbejte pokynů lékaře.



## 1. Úvod – Indikace

Anuform® se používá u mužů i žen jako intraanální sonda, u žen též i jako malá vaginální sonda. Používat výhradně se svalovou stimulací a EMG biofeedback vybavením podle EN-60601-01 při stresové, urgentní či smíšené inkontinenci nebo fekální inkontinenci.

## 2. Kontraindikace

### Pomůcku nepoužívejte:

- s elektrickou stimulací, pokud jste vybaveni kardiostimulátorem
- během těhotenství
- pokud je porušený nebo poškozený obal
- pokud trpíte infekcí, poškozením tkáně nebo máte v oblasti stimulace čerstvou chirurgickou jizvu
- vaginálně během menstruace
- s elektrickou stimulací u pacientů s dřívějším nálezem karcinomu v oblasti stimulace
- pokud se vyskytne podráždění či pocit nepohodlí, kontaktujte svého lékaře

### Anuform® jako anální elektrodu nepoužívejte, jestliže:

- trpíte akutními hemoroidy
- máte anální fisuru (trhlinku)
- pokud trpíte zánětlivým střevním onemocněním v tlustém střevě (IBD – Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)

## 3. Upozornění

### Zvýšená pozornost je třeba:

- při použití u pacientů se sníženou nebo změněnou citlivostí tkáně
- před použitím elektrické stimulace u pacientů s epilepsií, nutno konzultovat s lékařem
- při použití Anuform® se zařízením s výstupním proudem vyšším než 2mA/cm<sup>2</sup>. Pokud jste na pochybách, kontaktujte výrobce zařízení nebo svého lékaře.

## 4. Čištění

Čištění provádějte vždy před a po použití systému.


- Omyjte Anuform® v teplé mýdlové vodě.
- Opláchněte v čisté vodě a osušte.
- Opakujte po každém použití a důkladně osušte před vložením do obalu.
- **NEPOUŽÍVEJTE k čištění vařící vodu.**



## 5. Návod k použití:

### DŮLEŽITÉ:

- Před prvním a každým následujícím použitím vždy očistěte a osušte podle pokynů.
- Aplikujte tenkou vrstvu lubrikantu na konec sondy a na kovové povrchy sondy, tím pomůžete snadnému vložení a dobré vodivosti elektrody.
- **Anální použití:** Zavedte sondu do konečnicku. Současně zatlačte, jako byste se chtěli vyprázdnit. Část s kroužkem musí vždy zůstat mimo konečník.
- **Vaginální použití:** Vložte do vaginy s kovovými povrchy elektrody otočenými ke stehnům. Část s kroužkem musí vždy zůstat mimo vaginu.
- Před připojením kabelu k sondě se ujistěte, že zařízení je vypnuté.
- Používejte podle pokynů lékaře. Po použití vypněte zařízení a odpojte kabely. Nepoužívejte kabely k vytažení sondy.
- Umyjte, očistěte a skladujte podle výše uvedených instrukcí.

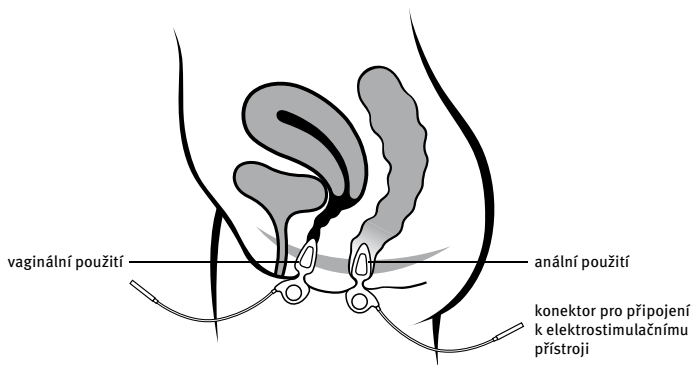

## 6. Likvidace

Před likvidací systém důkladně vyčistěte a likvidujte v souladu se zákonem o odpadech. Elektrické a elektronické části je třeba vyhodit do sběrných kontejnerů určených pro elektrický odpad, baterie do kontejnerů určených ke sběru baterií.

## 7. Specifikace:

### Materiály:

Tělo sondy: HIPS – Nárazuvzdorný polystyren

Elektrody: chirurgická ocel

Kabely: poměděné vodiče v PVC izolaci

Váha: 23,5 g

Délka kabelu: 300 mm

Konektory: 2 konektory 2 × 2 mm

Povrch elektrod: 3 cm<sup>2</sup> na elektrodu.

Maximální doba používání: 6 měsíců

