

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tyto instrukce.

PRO POUŽITÍ POUZE U JEDNÉ OSOBY – stejná osoba může pomůcku používat opakovaně.
Dbejte pokynů lékaře.



1. Úvod – Indikace

Periform®+ se používá jako intravaginální sonda při léčení ženské stresové inkontinence, urgentní inkontinence nebo smíšené inkontinence se svalovou stimulací a EMG biofeedback vybavením podle EN60601-01.

2. Kontraindikace

Pomůcku nepoužívejte:

- s elektrickou stimulací, pokud jste vybaveni kardiostimulátorem
- během těhotenství
- pokud je porušen nebo poškozen obal
- pokud trpíte infekcí, poškozením tkáně nebo máte v oblasti stimulace čerstvou chirurgickou jizvu
- během menstruace
- s elektrickou stimulací u pacientek s dřívějším nálezem karcinomu v oblasti stimulace
- pokud se vyskytne podráždění či pocit nepohodlí, kontaktujte svého lékaře


3. Upozornění

Zvýšená pozornost je třeba:

- při použití u pacientek se sníženou nebo změněnou citlivostí tkáně
- před použitím elektrické stimulace u pacientek s epilepsií, nutno konzultovat s lékařem
- při použití Periform®+ se zařízením s výstupním proudem vyšším než 2mA/cm². Pokud jste na pochybách, kontaktujte výrobce zařízení nebo svého lékaře.

4. Čištění

- Čištění provádějte vždy před a po použití systému.
- Omyjte Periform®+ v teplé mýdlové vodě.
- Opláchněte v čisté vodě a osušte.
- Opakujte po každém použití a důkladně osušte před vložením do obalu.
- **NEPOUŽÍVEJTE k čištění vařící vodu.**

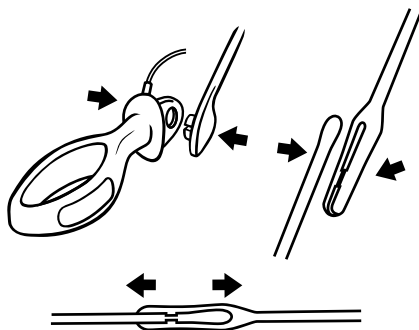

5. Návod k použití:

DŮLEŽITÉ:


- Před prvním a každým následujícím použitím vždy očistěte a osušte podle pokynů.
- Aplikujte tenkou vrstvu lubrikantu na konec sondy a na kovové povrchy sondy, tím pomůžete snadnému vložení a dobré vodivosti elektrody.
- Pokud používáte Indikátor stahů, připojte jej, jak je ukázáno na obrázku 1.
- Zaveďte do vaginy elektrody s kovovými povrchy otočenými ke stehněm. Část s kroužkem musí vždy zůstat mimo vaginu.
- Před připojením kabelu k sondě se ujistěte, že zařízení je vypnuté.
- Používejte podle pokynů lékaře. Po použití vypněte zařízení a odpojte kabely. Nepoužívejte kabely k vytažení sondy.
- Umyjte, očistěte a skladujte podle výše uvedených instrukcí.

Indikátor stahů:

Pokud je k Periform®+ připojen indikátor stahů, tak poskytuje důležité informace o výkonu svalstva pánevního dna. Sondy s indikátorem můžete používat samostatně, nebo ve spojení se zařízením pro stimulaci a biofeedback. Pokud se svaly pánevního dna svírají správným způsobem, indikátor se bude pohybovat směrem dolů. Pohyb směrem nahoru značí nesprávné stáhnutí svalů, jak je ukázáno v obrázku 2.

Funkce a výhody indikátoru:

- Kvantifikuje sílu a výdrž úmyslných a neúmyslných (stimulovaných) stahů.
Pozn.: Úmyslné stahy mohou pomoci posílení stimulovaných stahů.
- Indikuje potřebu použití stimulace k posílení ochablých svalů pánevního dna – tj. pokud se indikátor pohybuje málo nebo vůbec.
- Učí Vás posilovací techniky, abyste zabránila únikům moči během kašláním, kýcháním a jiné zátěže.
- Ukazuje úspěšnost cvičení posílení svalů pánevního dna.

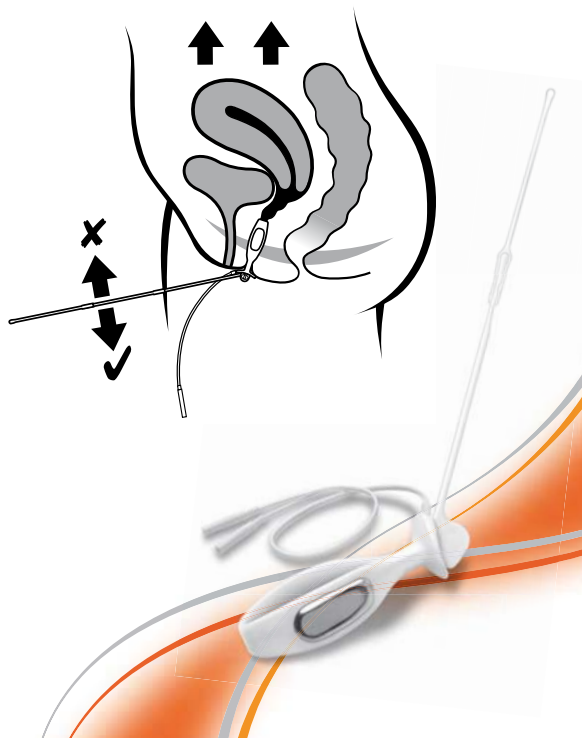

6. Likvidace

Před likvidací systém důkladně vyčistěte a likvidujte v souladu se zákonem o odpadech. Elektrické a elektronické části je třeba vyhodit do sběrných kontejnerů určených pro elektrický odpad, baterie do kontejnerů určených ke sběru baterií.

7. Specifikace:

Materiály:

Tělo sondy: HIPS – Nárazuvzdorný polystyren

Elektrody: chirurgická ocel

Kabely: poměděné vodiče v PVC izolaci

Váha: 19 g včetně kabelů

Délka kabelu: 340 mm

Konektory: 2 konektory 2 × 2 mm

Povrch elektrod: 4,9 cm² na elektrodu.

Maximální doba používání: 6 měsíců

